

Q-Etch UF Etching Gel

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Материал стоматологический адгезивный, вспомогательный.

Гель для травления.

Применение:

Гель на основе фосфорной кислоты предназначен для протравливания дентина и эмали, подготовки поверхности для наложения композитов с применением адгезивных систем.

Инструкция по применению:

Q-Etch UF наносится в контролируемом количестве на поверхности зубной эмали и дентина. Рекомендуемое эффективное время протравливания:

- Эмаль – 30 - 60 секунд
- Дентин – как указано в инструкции производителей адгезивных систем. Протравливающий гель должен быть смыт обильным количеством воды не менее 20 секунд.

Эмаль высушивать до появления на поверхности характерного белого замороженного узора.

Дентин – согласно инструкции производителя адгезивных систем.

Свойства:

- Гель остается в месте нанесения, не растекаясь.
- Отлично растворяется в воде и легко смывается.
- Прост в использовании. Аппликационные насадки предварительно изогнуты для обеспечения простого и точного нанесения геля, даже в случаях дистально и орально расположенной полости.
- Цвет геля облегчает его визуализацию.
- Одноразовые насадки экономят время и более гигиеничны.

Содержимое упаковки:

- Q-Etch UF – 1 шприц 10 мл.
- 20 аппликационных насадок.
- Инструкция по применению.

Состав:

Фосфорная кислота 37%, стабилизатор 2,99%, пигмент 0,01%, частицы кварца 10%, вода 50%.

Меры предосторожности:

Q-Etch UF содержит фосфорную кислоту. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта – промойте обильным количеством воды.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре от +10°C до +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Генеральный дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com