

Q SEAL™

Регистрационное удостоверение в РФ № ИМ-7.104884

Q-Seal Pit & Fissure Sealant

Материал стоматологический пломбирочный светоотверждаемый для фиссур

Применение:

Применяется для профилактического пломбирования фиссур.


Свойства:

- Легкое и аккуратное применение, используя технику прямого нанесения из шприца.
- Светоотверждаемый материал
- Низкая вязкость, превосходные свойства текучести, оптимальная смазываемость для фиссур.
- Содержит освобождаемые фториды.


Инструкция по применению:




1. Тщательно очистите поверхность эмали при помощи чистящей пасты, не содержащей масла или фторидов, или при помощи пемзы и щеточки.

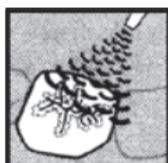


5. Высушить струей сжатого воздуха. Протравленная поверхность эмали должна быть матовой. Остерегайтесь попадания слюны на протравленную поверхность.

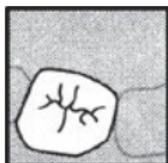


2. Изолировать обработанные поверхности.

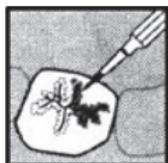


6. Установить новый аппликационный наконечник на шприц с Q-Seal™ и аккуратно выдавить небольшое количество материала на фиссуру. Убедиться, что материал полностью покрыл поверхность фиссуры. Вы можете использовать одно-разовую кисточку, микроаппликатор или аппликационный наконечник шприца для лучшего нанесения материала и удаления воздушных пузырьков.

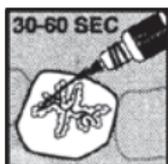

3. Нанести протравливающий гель на 30 – 60 секунд.

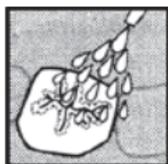

4. Тщательно промыть.

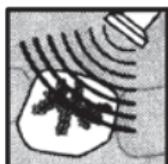

7. Полимеризуйте в течение 20 секунд.

8. Проверьте прикус.

Q SEAL™

Регистрационное удостоверение в РБ № ИМ-7.104884

Q-Seal Pit & Fissure Sealant

Материал стоматологический пломбировочный светоотверждаемый для фиссур

Содержимое упаковки:

- Q-Seal в шприцах, 1.2 мл - 2 шт.;
- Q-Etch в шприцах, 1.2 мл - 2 шт.;
- Наконечники аппликационные - 8 шт.
- Инструкция по применению.

Состав:

Олигомер уретандиметакрилата, Bis-GMA, Триэтиленгликольдиметакрилат, 2-Гидроксиэтилметакрилат, Микрочастицы кварца, Инициаторы светополимеризации.

Меры предосторожности:

Содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у восприимчивых лиц. Тщательно промыть водой с мылом после контакта. Если замечается реакция на коже, или если существуют аллергии на метакрилатные смолы, прекратить использование.

Противопоказания:

Использование Q-Seal противопоказано:

- Если фиссуры уже подвержены кариесу.
- Если нельзя обеспечить сухость рабочей поверхности при применении и полимеризации Q-Seal.
- Если пациент знает об имеющейся аллергии к каким-либо компонентам Q-Seal.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Ген. дистрибьютор в Республике Беларусь:

ООО «Салвум»

220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97 | 24

+375 (29) 634 04 07, +375 (29) 770 22 77

т/ф +375 (17) 395 73 30, salvum.med@hotmail.com

