

Q-CERAM™

ПРАЙМЕР ДЛЯ КЕРАМІКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Q-CERAM виробництва компанії В.І.М. – це кондиціонер, який використовується для поверхні керамічних протезів, зокрема конструкцій з кераміки та оксиду цирконію.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:

- Підготовка керамічних коронок, вінірів і вкладок перед цементуванням.
- Підготовка зламаних керамічних коронок для ремонту їх композитами.

ВЛАСТИВОСТІ:

В.І.М. Q-CERAM – це однокомпонентний праймер, який призначений для підготовки поверхні керамічних коронок перед бондингом з композитними цементами. Цей праймер покращує цементування цирконієвих коронок і не вимагає додаткового кондиціонування або піскоструменевої обробки. Його низька в'язкість і відмінні змочувальні властивості сприяють якнайкращому покриттю поверхні.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРОДУКТУ:

За умови зберігання при температурі до 24°C термін придатності: 2 роки.

ПІДГОТОВКА КЕРАМІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ДО БОНДИНГУ:

1. Очистіть керамічну поверхню спиртом і просушіть повітрям без домішок мастила.
2. Відкрийте пляшку праймера Q-CERAM і видавіть 1-2 краплі на палетку, негайно закрийте пляшку кришечкою.
3. Аплікатором нанесіть достатню кількість праймера на керамічну поверхню.
4. Зачекайте 1 хвилину.
5. Обережно просушіть протягом 20 секунд повітрям без домішок мастила.
6. Перейдіть до фіксації.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:

Етанол, вода, органічна кислота, силановий сполучний агент, 4-META

УВАГА:

Уникайте контакту матеріалу зі шкірою, м'якими тканинами порожнини рота, очима. У випадку контакту з м'якими тканинами порожнини рота, очима або зі шкірою промийте їх великою кількістю води та негайно зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м.Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua

 **B.J.M. Laboratories Ltd.**
12 Hassadna St., Industrial Park
Or-Yehuda 6022011, ISRAEL
Fax: 972-3-7353020
web: www.bjmlabs.com

