

Q-Seal™

KZ

ФТОР БӨЛЕТІН, ЖАРЫҚПЕН ҚАТАЙТЫЛАТЫН ФИССУРЛЫҚ ГЕРМЕТИК

ҚОЛДАНЫЛУЫ

- Шұңқырлар мен фиссурлардың алдын алу мақсатында герметизациялау үшін.


ҚАСИЕТТЕРІ

- Шприц арқылы оңай дәлдеп салуға ыңғайлы
- Жарықпен қатайтылады
- Тұтқырлығы аз, реологиялық қасиеті күшті, фиссураларды толтыруға қолайлы
- Фтор бөледі

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕ НУСҚАУЛЫҚ




1. Кіреукеңің бетін құрамында май немесе фториді жоқ жылтыратқыш пастамен щетка қолдану арқылы мұқият тазалау.

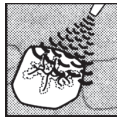


5. Су және май қоспасы жоқ ауамен келтіру керек. Уланған кіреуке тегіс ақ түсті болуы керек. Уланған беттің сілекеймен ласта-нуынан абай болу керек.




2. Жұмыс аймағын сілекейден оқшаулау керек.

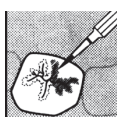


6. Q-SEAL шприцпен мөлшерлейтін ұштықты бекітіп, фиссурларды жеткілікті көлемде Q-SEAL-мен мұқият толтыру керек. Герметик барлық фиссурларды толтыруы керек. Герметикті көпіршіктерсіз біркелкі үлестіру үшін микроаппликаторды немесе мөлшерлейтін ұштықтың өзін қолдану керек.

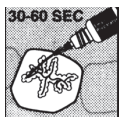

3. 30-60 секундқа дәрілейтін гельді жағу қажет.

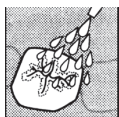

4. Мұқият жуу керек.

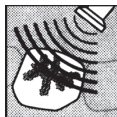

7. Герметикті 20 секунд шамасында қатайту керек.

Q-Seal™

KZ

ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР

Егер де фиссурлар тісжегімен зақымдалса, жұмыс аймағын сілекейден оқшаулауға мүмкіндік болмаса, науқаста герметиктің құрамдас бөлігінің біреуіне аллергия болса, онда герметизация жасауға болмайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Q-SEAL-дің құрамында сезімтал терісі бар адамдарда жанаспалы аллергиялық дерматит тудыратын полимерленетін мономерлер бар. Қолданғаннан кейін қолды сабындап, сумен мұқият жуу керек.

Егер де науқастың терісі сезімтал болса немесе полиметилакрилатқа аллергия бар болса, қолдануды дереу тоқтату қажет.

НЕГІЗГІ ҚОСПАЛАР

- Уретандиметакрилат
- Bis-GMA
- Триэтиленгликольдиметакрилат
- 2-гидроксиэтилметакрилат
- Шыны толтырғыштар
- Фотоинициаторлар

Материалдың сақталу мерзімі

24 °C (75 °F) - төн төмен температурада 2 жыл. Салқын жерде сақтау керек.

CE
0425



EC REP

B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
tel. 972-74-7000111 fax. 972-3-7353020
Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy
tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821
info@quasersrl.it www.quasersrl.it

BJM LAB

Q-Seal™

RU

СВЕТОВЕРЖДАЕМЫЙ ФИССУРНЫЙ ГЕРМЕТИК, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ФТОР


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для профилактической герметизации ямок и фиссур


СВОЙСТВА

- Легкое точное нанесение с помощью шприца
- Светоотверждаемый
- Малая вязкость, отличные реологические свойства, оптимальное заполнение фиссур
- Фторовыделение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

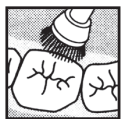


1. Тщательно очистить поверхность эмали чистящей пастой, не содержащей масла или фторидов, и щеткой.

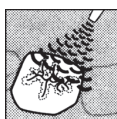


5. Просушить воздухом, без примесей воды и масла. Протравленная эмаль должна иметь матовый белый цвет. Избегать загрязнения протравленной поверхности слюной.




2. Изолировать рабочую область от слюны.

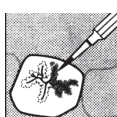


6. Закрепить дозирующий наконечник на шприце Q-SEAL, аккуратно внести достаточное количество Q-SEAL в фиссуру. Герметик должен заполнить все фиссуры. Для распределения герметика без воздушных пузырьков можно использовать микроапликатор или сам дозирующий наконечник. **7.** отвердить герметик в течении 20 секунд.

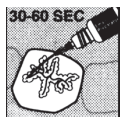

30-60 SEC
3. Нанести протравливающий гель на 30-60 секунд.

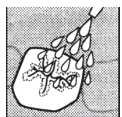

4. Тщательно промыть.

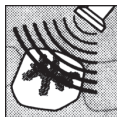

7. Проверить окклюзию.

Q-Seal™

RU

ОСНОВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ

- Олигомер уретандиметакрилата
- Bis-GMA
- Триэтиленгликольдиметакрилат
- 2-гидроксиэтилметакрилат
- Стеклонаполнители
- Фотоинициаторы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

герметизацию не проводят, если:

- Фиссуры уже повреждены кариесом
- Если невозможно изолировать рабочую поверхность от слюны
- Если у пациента аллергия на один из компонентов герметика

Меры предосторожности:

Q-SEAL содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. После контакта тщательно промыть водой с мылом. Если кожа чувствительная или существует аллергия на полиметил акрилат, немедленно прекратить использование.

Срок хранения материала:

2 года при температуре ниже 24°C (75°F).

CE
0425



ADVANCED
DENTISTRY

EC REP

B.J.M. Laboratories Ltd.
12 Hassadna St., Industrial Park,
Or-Yehuda 6022011, Israel
tel. 972-74-7000111 fax. 972-3-7353020
Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.
Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy
tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821
info@quasersrl.it www.quasersrl.it

BJM LAB