

AUTO-CURE ACTIVATOR™

AUTO-CURE ACTIVATOR

Активатор химической полимеризации.

РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20.09.2011г.

Применение:

Активатор для химической самополимеризации адгезивных систем **Prima 2000** и **Prima Quick**

- Применяется для адгезивной (химической полимеризации) фиксации коронок и мостов, включая вкладки и накладки стекловолоконных штифтов и шинирующей ленты для восстановления культи зуба.

Инструкция по применению:

1. Поместите в чистый контейнер равное количество капель **Prima 2000** и активатор **Auto-Cure Activator**. При использовании **Prima Quick** - равное количество **Quick Bond** и активатор **Auto-Cure Activator**. Перемешайте в течение 2 секунд чистой кистью или аппликатором.
2. При помощи той же кисти нанесите необходимое количество смеси и оставьте на 15 секунд.
3. Удалите растворитель мощной струей воздуха в течение 15 секунд или пока не прекратится движение жидкости на поверхности. Если поверхность окажется покрытой не полностью, нанесите дополнительный слой материала и вновь подсушите.
4. Для фиксации используется композитный цемент **High-Q-Bond Adhesive Resin Cement** или любой другой аналогичный материал.
5. Нет необходимости в использовании светоотверждаемых аппаратов.

Содержимое упаковки:

- 1 флакон активатора **Auto-Cure Activator** 4 мл.

Состав:

- Ацетон, гидроксиэтилметакрилат, этиловый спирт, окислительные вещества.

Меры предосторожности:

Активатор **Auto-Cure Activator** содержит ацетон и полимеризующиеся мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у подверженных ему людей. В случае контакта, тщательно промыть водой с мылом. При повышенной чувствительности кожи или, если заранее известна аллергия на метакрилатную смолу, прекратить использование. Избегайте нагрева.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.
shop@medenta.ru | www.medenta.ru

2INS033BJM Rev.4 08/2018

