

Quick Seal™

Quick Seal™

RU

САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ФИССУРНЫЙ ГЕРМЕТИК, ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ФТОР


ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для профилактической герметизации ямок и фиссур, используя метод самопротравливания.

СВОЙСТВА


- Однокомпонентный материал
- Одношаговый
- Самопротравливающий
- Легкое точное нанесение с помощью шприца
- Светоотверждаемый
- Малая вязкость, отличные реологические свойства, оптимальное заполнение фиссур
- Фторовыделение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

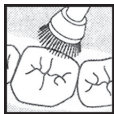


Тщательно очистить поверхность эмали полировочной пастой, не содержащей масла или фторидов, и щеточкой. Тщательно прополоскать и просушить.

Избегать загрязнения просушенной поверхности слюной.

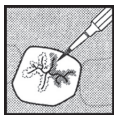

Закрепить дозирующий наконечник на шприце Quick SEAL и аккуратно нанести достаточное количество герметика на фиссуры. Для распределения материала и устранения воздушных пузырьков можно использовать микро-апликатор или сам дозирующий наконечник.

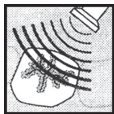

Позволить материалу осесть на поверхности эмали в течении 15 секунд.

Светоотвердить в течении 20 секунд.

Проверить окклюзию.

RU

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Олигомер уретандиметакрилата
- Bis-GMA
- Триэтиленгликольдиметакрилат
- 2-гидроксиэтилметакрилат
- Самопротравливающее вещество
- Белый пигмент
- Стеклонаполнители
- Фотоинициаторы

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Герметизацию не проводят, если:

- Фиссуры уже повреждены кариесом
- Если невозможно изолировать рабочую поверхность от слюны
- Если у пациента аллергия на один из компонентов герметика

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Quick Seal содержит полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у людей с чувствительной кожей. После контакта тщательно промыть водой с мылом.

Если кожа чувствительная или существует аллергия на полиметилакрилат, немедленно прекратить использование.

СРОК ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

- 2 года при температуре ниже 24°C (75°F).
- Хранить в холодильнике

CE
0425



EC REP

B. J. M. Laboratories Ltd.

12 Hassadna St., Industrial Park,

Or-Yehuda 6022011, Israel

tel. 972-74-7000111 fax. 972-3-7353020

Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.

Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy

tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821

info@quasersrl.it www.quasersrl.it

BJM LAB

Quick Seal™

Quick Seal™

KZ

Өзін-өзі дәрілейтін, фтор бөлетін, жарықпен қатайтылатын фиссурлық герметик


ҚОЛДАНЫЛУЫ

Шұңқырлар мен фиссурлардың алдын алу шарасы ретінде, өзін-өзі дәрілеу әдісін қолдану арқылы герметизациялау үшін.

ҚАСИЕТТЕРІ


- Бір құрамдас бөлікті материал
- Бірқадамды
- Өзін-өзі дәрілейтін материал
- Шприц арқылы оңай дәлдеп салуға ыңғайлы
- Жарықпен қатайтылады
- Тұтқырлығы аз, реологиялық қасиеті күшті, фиссураларды толтыруға қолайлы
- Фтор бөледі

ҚОЛдану ЖӨНІНДЕ Нұсқаулық

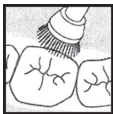


Кіреукенің бетін құрамында май немесе фториді жоқ жылтыратқыш пастамен щеткамен қолдана отырып мұқият тазалау қажет.

Мұқият шайып, кептіру керек. Кептірілген тіс бетінің сілекеймен ластануынан абай болу қажет.

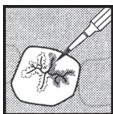

QUICK SEAL шприціне мөлшерлейтін ұштықты бекітіп, герметиктің жеткілікті көлемін фиссурларға мұқият жағу керек. Герметикті біркелкі үлестіру үшін және көпіршіктерді болдырмау үшін микроаппликаторды немесе мөлшерлейтін ұштықтың өзін қолдану керек.

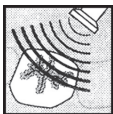

Материалдың кіреукенің бетінде 15 секунд өздігімен тұруына мүмкіндік беру керек. 20 секунд жарықпен қатайту қажет.

Окклюзияны тексеріңіз.

KZ

ҚОЛдануға БОЛМАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАР

Егер де фиссурлар тіскөгімен зақымдалса, жұмыс аймағын сілекейден оқшаулауға мүмкіндік болмаса, емделушіде герметиктің құрамдас бөлігінің біреуіне аллергия болса, онда герметизация жасауға болмайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Quick Seal-дің құрамында сезімтал терісі бар адамдарда жанаспалы аллергиялық дерматит тудыратын полимерленетін мономерлер бар. Қолданғаннан кейін қолды сабындап, сумен мұқият жуу керек.

Егер де науқастың терісі сезімтал болса немесе полиметилакрилатқа аллергия бар болса, қолдануды дереу тоқтату қажет.

НЕГІЗГІ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР

- Уретандиметакрилат
- Bis-GMA
- Триэтиленгликольдиметакрилат
- 2-гидроксиэтилметакрилат
- Өзін-өзі дәрілейтін заттек
- Ақ бояутек
- Шыны толтырғыштар
- Фотоинициаторлар

МАТЕРИАЛДЫҢ САҚТАЛУ МЕРЗІМІ

- 24 °C (75 °F) – төн төмен температурада 2 жыл.
- Тоңазытқышта сақтау керек.

CE
0425



EC REP

B. J. M. Laboratories Ltd.

12 Hassadna St., Industrial Park,

Or-Yehuda 6022011, Israel

tel. 972-74-7000111 fax. 972-3-7353020

Info@bjmlabs.com www.bjmlabs.com

QUASER S.r.l.

Via Pian due Torri 19, 00146 Rome, Italy

tel. 39-06-55282325 fax. 39-06-55290821

info@quasersrl.it www.quasersrl.it

BJM LAB

2CRB023 Rev.3 10.2018