

Porcelain Fix™

РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20/09/2011г.

Porcelain Fix Preparation Kit

Набор материалов стоматологических адгезивных для обработки керамики.

Применение:

Комплект Porcelain Fix Preparation Kit предназначен для улучшения адгезии при подготовке фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок, зубов и пр.) к установке, а также при восстановлении и ремонте поврежденных керамических или металло-керамических конструкций.

Свойства:

- Porcelain Fix Preparation Kit набор материалов для подготовки к приклеиванию фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок и пр.). Porcelain Fix Preparation Kit состоит из Porcelain Etch™ и Porcelain Silane™.
- Porcelain Etch™ специальная кислота для травления фарфора. Придает микроскопическую шероховатость поверхности, обеспечивает прочное механическое сцепление с композитами и адгезивами.
- Porcelain Silane™ - отдельный компонент для обработки поверхности, усиливает сцепление и надежность адгезии к протравленному фарфору.

Содержимое упаковки:

- Porcelain Etch™ в шприцах 1,2 мл - 2 шт.;
- Porcelain Silane™ во флаконах 2 мл - 2 шт.;
- Шприцы пустые для Porcelain Silane™ 1,2 мл - 2 шт.;
- Наконечники аппликационные - 4 шт.;
- Наконечники с микроапликатором - 4 шт.;

Состав:

Porcelain Etch™: плавиковая кислота 8%, вода 90,5%, загуститель 1,5%.
Porcelain Silane™: этанол 97%, глицидоксипропилтриметоксисилан 3%.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.
shop@medenta.ru | www.medenta.ru



2CR8021 Rev.5 11/2022

Porcelain Fix™

ПУ №ФСЗ 2011/10681 от 20/09/2011г.

Porcelain Fix Preparation Kit

Набор материалов стоматологических адгезивных для обработки керамики.

Инструкция по применению:

Подготовка керамической поверхности к приклейке:

1. В случае использования во рту пациента, изолируйте протравливаемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической коронки: перед травлением, бором средней твердости, удалите глазурированное покрытие с приклеиваемой поверхности, чтобы нанести достаточный для прочности и эластичности слой адгезива или композита. Смойте остатки с керамической поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите Porcelain Etch на поверхность керамики и оставьте на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керамику для удаления кислоты и высушите. Протравленная керамика должна иметь белый «замороженный» узор. В противном случае повторите процедуру травления.
5. Нанесите кисточкой Porcelain Silane на протравленную поверхность и тщательно высушите потоком воздуха.

Примечание: процедуры реставрации и ремонта керамики указаны в иллюстрированных инструкциях для High-Q-Bond Adhesive Resin Cement.

Меры предосторожности:

Будьте осторожны и осмотрительны при применении Porcelain Etch. Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой рта, кожей и глазами. При случайном контакте, обильно смойте водой и, в случае необходимости, окажите необходимую медицинскую помощь. В случае применения Porcelain Etch во рту пациента, рекомендуется изолировать обрабатываемую поверхность.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, причиненный в результате неправильного использования или обращения.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»
Россия, 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25.
Контактная информация:
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.
shop@medenta.ru | www.medenta.ru



2CR8021 Rev.5 11/2022